






ES**SENTiFIT® pierceTube****REF 1156188**

IVD

CE

TUBO RECOGIDA DE HECES**PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE MUESTRA****PRECAUCIONES GENERALES**

- A) No recoja la muestra durante la menstruación o si hay sangrado en el recto (ej. Hemorroides u otras causas)
- B) No permita que las heces de la que va a tomar la muestra se mezclen con orina o el agua del inodoro.
- C) Realice la recogida de la muestra inmediatamente después de defecar.
- D) No es necesario realizar ninguna dieta especial los días previos
- E) Evite que el líquido del tubo sea ingerido o contacte con ojos y mucosas. El tubo está especialmente diseñado para evitar fugas del líquido.
- F) No introducir el tubo en el ano.
- G) Utilice el tubo sólo una vez. Si es necesario, solicite otro en su centro de salud.
- H) Mantenga el tubo fuera del alcance de los niños.

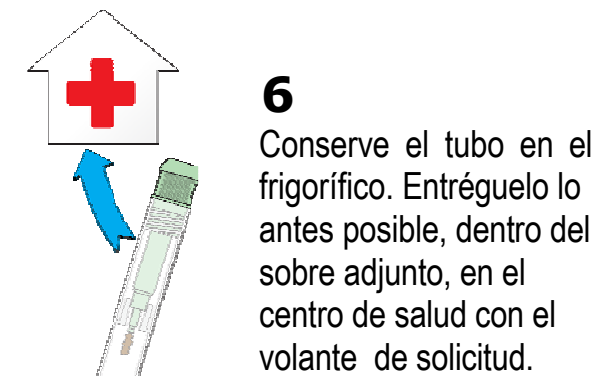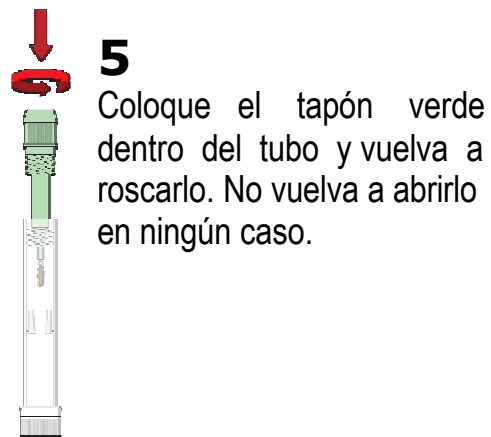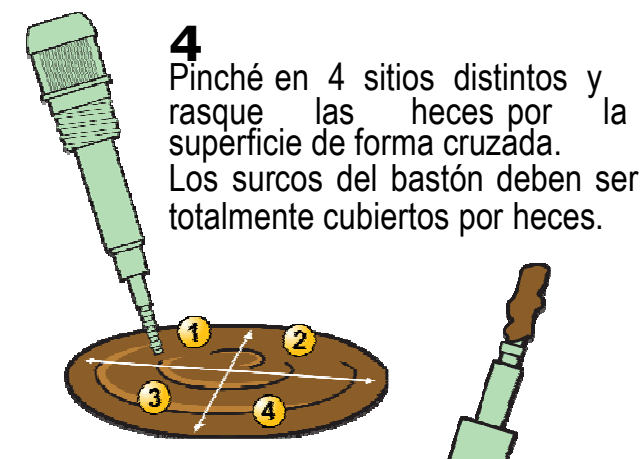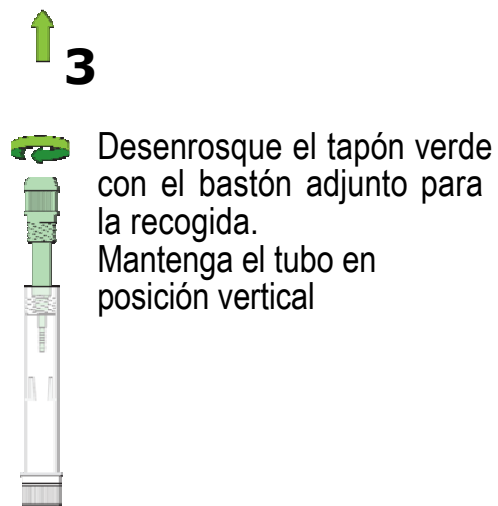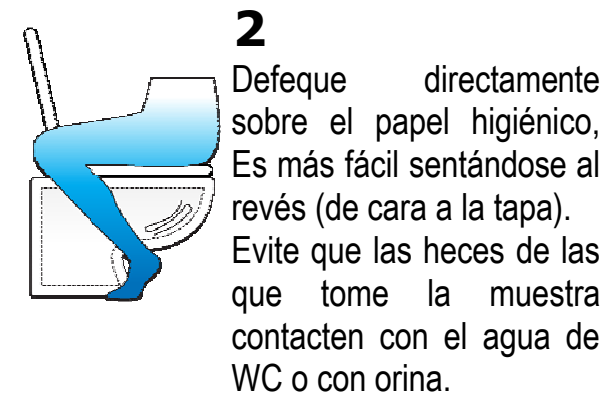

lea_1156188-1.0/ 05

SENTINELSENTINEL CH. SpA - Ph. +39 02 3455141
Via Robert Koch, 2 Milano 20152 Italy